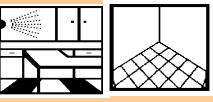



Hygieneplan für die Praxis

Objekt:	Zeitpunkt:	Art:	Produkt:	Verantwortlich:
Händedesinfektion 	Vor und nach Patientenkontakt, nach Kontakt mit kontaminierten Materialien, nach der Toilettenbenutzung, vor und nach den Pausen, sowie bei Bedarf.	Desinfektionsmittel in die trockenen Hände geben und gründlich über die Hände verteilen, einreiben und 30 Sek. feucht halten. Fingerkuppen u. Nagelfalz besonders beachten.	Händedesinfektionsmittel aus dem Direktspender. PLIWA® Derm	Alle Mitarbeiter/innen
Chirurgische Händedesinfektion 	Vor operativen Eingriffen + Nach operativen Eingriffen	Hände und Unterarme gründlich waschen, mit Wasser abspülen und abtrocknen. Desinfektionsmittel portionsweise in die trockenen Hände geben, Hände und Unterarme bis zu den Ellenbogen einreiben. Während der gesamten Applikationszeit mind. 5 Min. feucht halten.	PLIWA® San PLIWA® Soft PLIWA® Decontamed PLIWA® Derm	Arzt
Händewaschung 	Bei sichtbarer Verschmutzung Bei Bedarf	Waschlotion in die Hände geben, gründlich mechanisch reinigen und abspülen. Einmalhandtücher verwenden.	PLIWA® San PLIWA® Soft PLIWA® Decontamed	Alle Mitarbeiter/innen
Hand-/Hautpflege 	Mehrmals täglich und so oft wie möglich, insbesondere nach dem Händewaschen.	Gleichmässig in die trockenen Hände oder die betroffenen Hautstellen einmassieren.	PLIWA® Arabella fresh	
Einrichtungsgegenstände 	Nach Patientenwechsel	Flächen vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Einmalhandtuch nachwischen. Mit getränkten Vliestüchern vollständig abwischen.	PLIWA® Lemon Fresh AF PLIWA® Hygiene Tücher Lemon Fresh AF	Zahnarztthelfer/innen
Bodenreinigung 	Täglich Bei Bedarf	Flächen nach Dosierungsanleitung wischen. Bei Bedarf trocken nachwischen.	PLIWA® Sal	beauftragtes Reinigungspersonal
Wischdesinfektion 	Täglich Nach Kontamination	Desinfizierende Feuchtwischmethode, nicht nachtrocknen. Nach der Einwirkzeit mit klarem Wasser nachwischen.	PLIWA® Big AF	beauftragtes Reinigungspersonal
Instrumentendesinfektion 	Nach jeder Benutzung	Instrumente in die vorschriftsmässig ange-setzte Lösung legen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit reinigen und unter fliessendem Wasser abspülen, trocknen und ggf. sterilisieren	PLIWA® Biguaton forte oder PLIWA® Biguaton forte NEU	Zahnarztthelfer/innen
Hand-/Winkelstücke 	Nach der Behandlung	Nach Vorschriften des Herstellers warten und desinfizieren	PLIWA® Lemon Fresh AF	Zahnarztthelfer/innen

Hygieneplan für die Praxis

Objekt:	Zeitpunkt:	Art:	Produkt:	Verantwortlich:
Rotierende Instrumente 	Nach jeder Benutzung	Instrumente in die Desinfektionslösung einlegen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit trocknen und ggf. sterilisieren.	PLIWA® Bohrerbad	Zahnarzthelfer/innen
Getragener Zahnersatz 	Vor Laborversand bzw. gleich nach Erhalt vom Patienten.	Objekt einlegen, nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen und mit klarem Wasser abspülen und trocknen.	PLIWA® Biguaton Spezial	Zahnarzthelfer/innen
Abformungen 	Vor Laborversand bzw. gleich nach Erhalt vom Patienten.	Reinigen Desinfizieren, 15 Min. in 6%iger Lösung Danach 10 Min. trocknen lassen.	PLIWA® Löffelreiniger PLIWA® Biguaton Spezial	Zahnarzthelfer/innen
Absauganlage 	Am Ende des Behandlungstages, falls nötig auch mehrmals am Tag. Vorschriften des Geräteherstellers sind zu beachten.	Die nach Vorschrift angesetzte Lösung durchsaugen. Eventuell Filter wechseln.	PLIWA® Mikroclean	Zahnarzthelfer/innen
Schutzkleidung 	Berufs-/Schutzkleidung vor Kontamination schützen. Bei Spritzgefahr	Flüssigkeitsdichte Schürze Schutzbrille Mundschutz	Jeweils tätigkeitsbezogen anlegen, danach abwerfen.	Alle Mitarbeiter/innen
Einmalhandschuhe	Bei Umgang mit Blut, Auswurf oder hautschädigenden Stoffen. Beim Desinfizieren und Reinigen von Flächen, Geräten und Instrumenten.	Vor allen medizinischen Handlungen, danach abwerfen. Tätigkeitsbezogen anlegen, danach abwerfen.	Dünnwandige, flüssigkeitsdichte Einmalhandschuhe feste, flüssigkeitsdichte Einmalhandschuhe	Alle Mitarbeiter/innen
Abfall 	Täglich nach Entleerung Nach Bedarf	Desinfizierende Feuchtwischmethode. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände nur sicher umschlossen in den Abfall geben. (§13 BGV C8)	Abfallbeutel Spezielle Behälter für verletzungsgefährdenden Abfall.	Zahnarzthelfer/in/nen Reinigungskraft

**RICHTIG
DOSIEREN**

	0,25%	0,50%	1%	2%	5%	8%	10%
1 Liter	2,5 ml	5 ml	10 ml	20 ml	50 ml	80 ml	100 ml
2 Liter	5 ml	10 ml	20 ml	40 ml	100 ml	160 ml	200 ml
5 Liter	12,5 ml	25 ml	50 ml	100 ml	250 ml	400 ml	500 ml
8 Liter	20 ml	40 ml	80 ml	160 ml	400 ml	640 ml	800 ml
10 Liter	25 ml	50 ml	100 ml	200 ml	500 ml	800 ml	1000 ml

Gebrauchsanweisung und Produktinformation bzw. Etikett genau beachten.