

PLIWA Löffelreiniger

Konzentrat zur Herstellung einer Gebrauchslösung für die Reinigung von Abdrucklöffeln



Produktbeschreibung

Konzentrat zur Herstellung einer Gebrauchslösung für die Reinigung von Abdrucklöffeln.

Anwendungsgebiete

Geeignet für die Reinigung von Abdrucklöffeln aus Edelstahl und Kunststoff.

Besondere Hinweise

Lesen Sie vor Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt.

Verschließen Sie das Gebinde sofort nach jeder Entnahme.

Das Produkt hat keine Ätz- oder Zersetzungswirkung, die Materialreste ablöst.

Standzeit und Haltbarkeit

Standzeit der Gebrauchslösung: 1 Tag.

Nach Anbruch Produkt innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

Das Verfallsdatum des Produktes entnehmen Sie dem Etikett. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Lagerungshinweise

Lagerung zwischen 5°C und 25°C. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Produkt stehend lagern. Von Zündquellen fernhalten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nur im Originalgebinde aufbewahren. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bestellinformationen

Einzelpackung	Verpackungseinheit	REF
1 Liter Zylinderflasche	10 x 1 Liter (Karton)	10-200
5 Liter Kanister		10-203

Dosierhilfen für Kanister

Dosierpumpe	50006
Auslaufhahn	50009

Anwendung

Vor der Reinigung Schutzkleidung/Schutzhandschuhe und ggf. Augenschutz anlegen.

1) Gebrauchslösung ansetzen. Je nach Verschmutzungsgrad 5-10%. Beispiel für eine 10%ige Gebrauchslösung: 900 ml Trinkwasser (max. 30°C) + 100 ml Konzentrat mischen.

2) Abdrucklöffel grob von anhaftenden Materialien (Alginat, Zement, Silikon) reinigen und möglichst über Nacht in die Gebrauchslösung einlegen.

3) Nach Entnahme aus der Gebrauchslösung mit einer Bürste Materialreste von den Abdrucklöffeln entfernen.

4) Abdrucklöffel unter fließendem Wasser abspülen.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)



Für Informationen zur Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) siehe Sicherheitsdatenblatt und Etikett.

Kennzeichnung gemäß Verordnung 648/2004/EG über Detergenzien

≥5% - <15% nichtionische Tenside

< 5% anionische Tenside

Desinfektionsmittel, Konservierungsmittel (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE)

Weiterführende Informationen

Für genauere Details, weitere Produktinformationen oder Antworten auf individuelle Fragen, können Sie uns per E-Mail unter info@pliwa.de oder telefonisch unter +49 (0)5661-7317-0 erreichen.



PLIWA Hygiene GmbH

Pliwastraße 2

34323 Malsfeld

www.pliwa.de

Tel. 05661 / 73 17 0

Fax 05661 / 73 17 10

info@pliwa.de

PLIWA Löffelreiniger

Konzentrat zur Herstellung einer Gebrauchslösung für die Reinigung von Abdrucklöffeln

Datenblatt gemäß Verordnung (EG) 648/2004 Anhang VII Abschn. D

Name des Reinigungsmittels: PLIWA Löffelreiniger

Hersteller: PLIWA Hygiene GmbH, Pliwastr. 2, 34323 Malsfeld

Inhaltsstoffe:

AQUA
ISOPROPYL ALCOHOL
1-Heptanol, 2-propyl-,7EO
PROPYLENE GLYCOL
SODIUM COCETH-30 SULFATE
GLYCOLIC ACID
BENZOTRIAZOLE

Link zur Pharmacos-Website: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cosing/index_de.htm

